


Beat2Phone-pilvipalvelun käyttö

HUOM! Beat2Phone-tuote ei ole direktiivin 93/42/ETY (engl. 93/42/EEC) mukainen lääkinnällinen laite. VitalSignum Oy ei vastaa mittaustulosten oikeellisuudesta eikä toimenpiteistä, joihin niiden pohjalta on ryhdytty.

Beat2Phone-pilvipalvelu löytyy osoitteesta <https://www.beat2phone.net>


Pilvipalveluun kirjaudutaan mobiilisovelluksessa luodulla käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

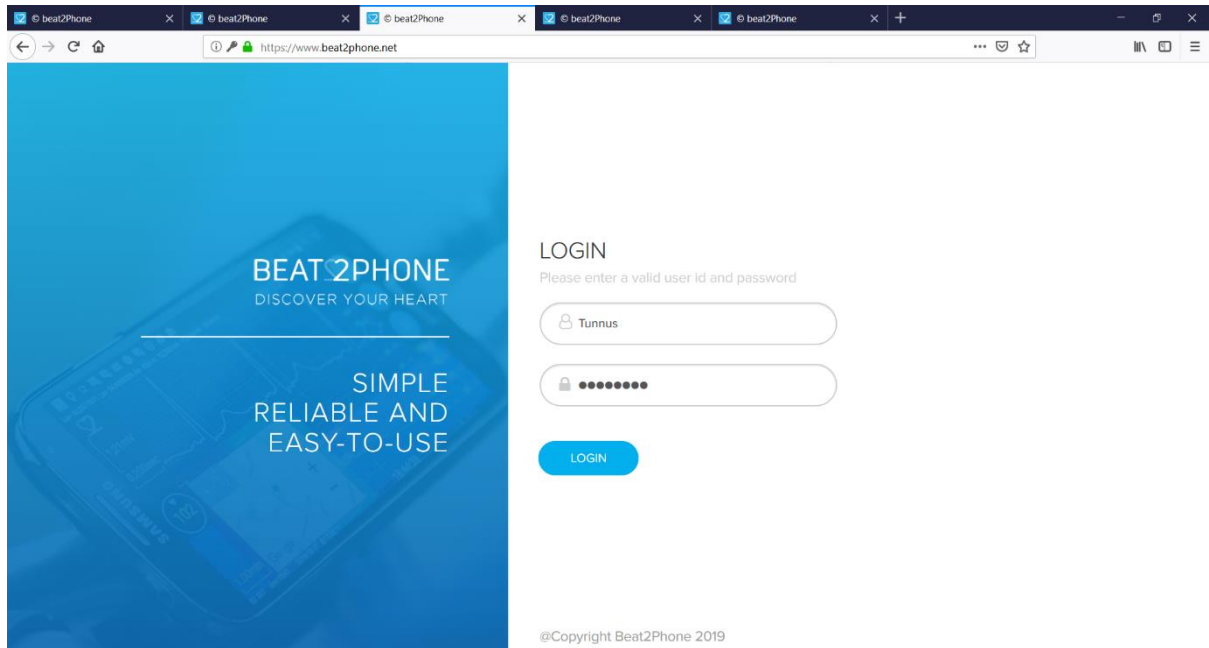

Kirjaututtasi sisään näet oman käyttäjätunnuksesi. Klikkaa nappia 'View Data' sivun oikeasta laidasta avataksesi listan ekg-rekisteröinneistä. 'Delete' -nappi ei tee tällä hetkellä mitään, joten sen painamisesta ei ole haittaa.

[View Data](#)

Näet nyt listan ekg-rekisteröinneistä. Rekisteröinnit on nimetty rekisteröintipäivämäärän ja ajankohdan mukaan. Uusin rekisteröinti on listalla ensimmäisenä eli ylimpänä. Jos olet tehnyt ekg-mittauksen aikana merkintöjä eli annotaatioita mobiilisovelluksella, myös ne näkyvät tässä listassa.

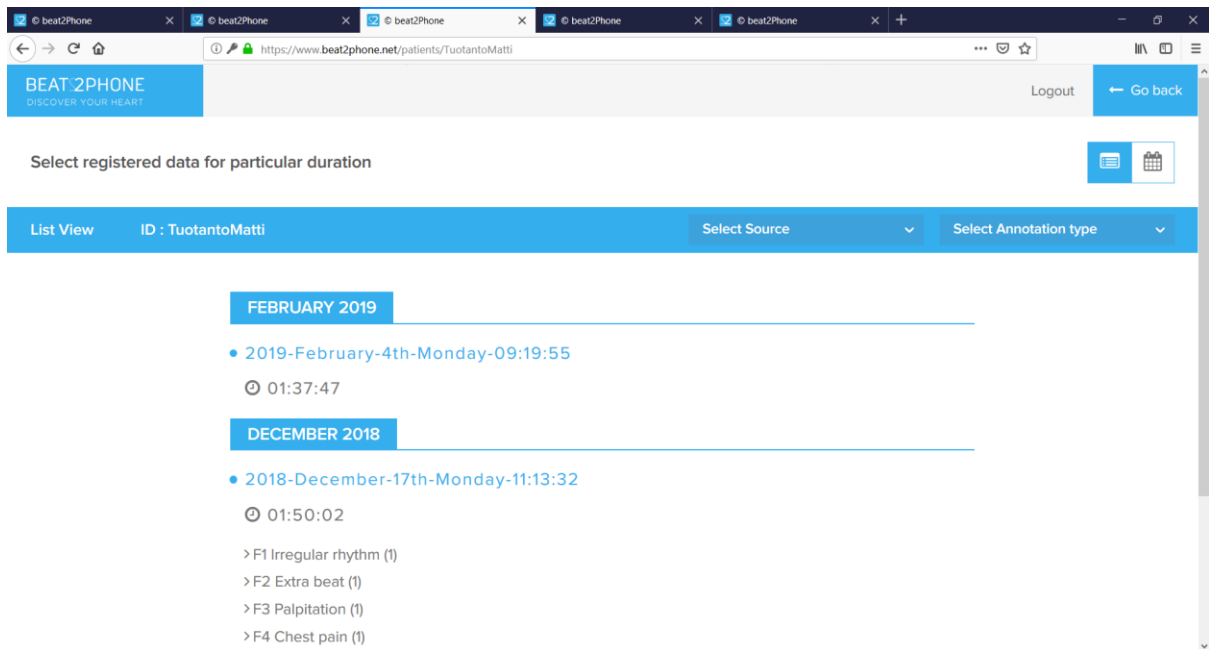

Valitse tarkasteltava rekisteröinti klikkaamalla rekisteröinnin nimeä.

• 2018-December-17th-Monday-11:13:32

Tarkastelunäkymä avautuu.



Sivun vasemmassa laidassa näkyy tarkastelunäkymän asteikko. Kaksi ruutua pystysuunnassa on 1.00 millivoltia, ja kaksi ruutua vaakasuunnassa on 0.200 sekuntia. Vaaka-asteikkoa voi muuttaa rullaamalla hiiren rullalla. Asteikko palautuu alkutilaan klikkaamalla Beat2Phone-logoa. Lisäksi vasemmassa laidassa näkyy syke tarkasteltavana ajanhetkenä.

Asteikon palautus alkutilaan

Asteikko y-suunnassa
1.00 mV

Asteikko x-suunnassa
0.200 s

HEART RATE
61
Syke

Sivun ylälaudassa on kontrollit rekisteröinnin automaattiseen toistamiseen ja annotaatioiden välillä liikkumiseen. Kohdassa 'Annotations' voidaan liikkua annotaatioiden välillä nuolinäppäimien avulla. Nuoli eteenpäin hyppää seuraavaan annotaatioon, ja nuoli taaksepäin hyppää edelliseen annotaatioon. Kohdassa 'Play/Pause' voidaan valita, halutaanko toistaa ekg-käyrää vai sen alapuolella olevaa sykekäyrää. Valinnan jälkeen ovat toistonapit sekä eteen- että taaksepäin toistamiseen. Kohdassa 'Speed Control' voidaan säätää toistonopeutta.


Annotations: Src, Type, Play / Pause, ECG/HR, Speed Control: 1/4X, 1/2X, 1X, 2X, 4X, Go back

Annotation lähde, Annotaation tyyppi, Annotaatioiden välillä siirtyminen, EKG/HR-Valinta, Toisto eteen- ja taaksepäin, Toistonopeuden säätö, Paluu takaisin rekisteröintien listaukseen

Sivun oikeassa laidassa on erinäisiä painikkeita, joista osaa ei ole vielä toteutettu. Ensimmäisestä painikkeesta voidaan lisätä annotaatioita tiedostoon, mikä ei vielä toimi. Seuraavasta painikkeesta avautuu toiminto segmenttien ajallisen keston mittaamiseen. Keskimmäisestä painikkeesta avautuu millimetripaperinäkö ekg-käyrästä. Roskakoripainike ei tee tällä hetkellä mitään. Viimeisestä painikkeesta saa auki asetukset.

- Lisää annotaatio (ei toimi)**
- Segmenttien keston mittaus**
- Millimetripaperinäkö**
- Ei tee mitään**
- Asetukset**

Segmenttien keston mittaus -työkalulla voidaan arvioida eri aaltojen ja segmenttien ajallista kestoa. Työkalu avataan painamalla painiketta sivun oikeasta laidasta. Työkalua käytetään viemällä ensin sivulla näkyvä pystykatkoviiva haluttuun paikkaan, esimerkiksi P-aallon alkuun, ja painamalla sen jälkeen vastaavaa painiketta käyrän ylälaudasta, esim. "Onset P".

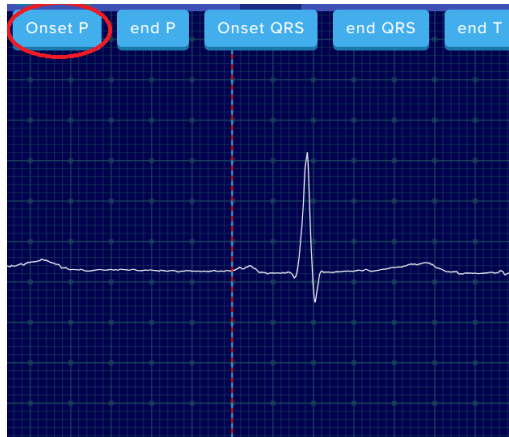

Vie sininen katkoviiva P-aallon alkuun ja klikkaa 'Onset P'



Siirrä sininen katkoviiva P-aallon loppuun ja klikkaa 'end P'



Sivusto näyttää nyt P-aallon pituuden millisekunteina